

Produktinformation om Navina Smart

Produktbeskrivelse

Transanalt irrigationssystem med elektronisk kontrolenhed.

Holdbarhed og anvendelser

Alle komponenter i Navina-irrigationssystemet har en holdbarhed på 3,5 år, undtagen Navina-katetre og Navina-kateterstudser, som har 2 års holdbarhed. Når Navina-komponenter pakkes i sæt, er det komponenten med den korteste holdbarhed, der bestemmer sættets holdbarhed.

Bemærk, at Navina Smart-kontrolenheden også har en "seneste opladningsdato" på 1,5 år fra produktionsdatoen.

Navina-katetre og -kateterstudser er til engangsbrug, mens vandbeholderen kan bruges 15 gange, slangesættet kan bruges 100 gange, og Navina Smart-kontrolenheden 400 gangen eller i to år fra datoen for første anvendelse.

Materialesammensætning

Katetermateriale: Styren-ethylen-butylen-styren (SEBS)/polypropylen (PP) med en hydrofil polyvinylpyrrolidonbelægning (PVP).
Primært emballagemateriale: PE/PET-pose.
Sekundært emballagemateriale: Karton og bølgepap.

Tilsigtet anvendelse

Navina-systemerne er beregnet til transanal irrigation ved at tilføre vand til tyktarmens nederste del via et rektalkateter.

Indikationer for brug

Navina-systemerne har til formål at hjælpe voksne og børn fra 3-års alderen, der lider af fækal inkontinens, kronisk forstoppelse og/eller tidskrævende tarmpleje. Vand, der tilføres tyktarmens nederste del, kan sætte gang i de peristaltiske muskler i tarmen, så de begynder at tømme indholdet fra den nederste del af tyktarmen og endetarmen.

Kontraindikationer

Brug IKKE Navina-systemer, hvis du har en eller flere af følgende lidelser:

- Kendt anal eller colorektal forsnævring
- Aktiv inflammatorisk tarmsygdom
- Akut divertikulitis
- Colorektal cancer
- Iskæmisk kolitis
- Inden for de seneste tre måneder har fået foretaget anal eller colorektal kirurgi.
- Du har fået foretaget endoskopisk polypektomi inden for de seneste 4 uger.
- Du er gravid.

Da listen muligvis ikke er udtømmende, skal sundhedspersonalet også altid tage individuelle brugerfaktorer i betragtning.



Navina Smart System

Reference	Type	Specifikation
6900911	Navina Smart-system – Normal	1 Navina Smart-kontrolenhed
6901011	Navina Smart-system – Lille	1 strømadapter
6901911	Kateterstud til Navina Smart-system	1 kabel
		1 vandbeholder
		1 vandslangesæt
		2 rektalkatetre
		1 Navina-taske
		1 tilbehørssæt
6900310	Navina-forbrugsvarer – Normal	1 vandbeholder
6900410	Navina-forbrugsvarer – Lille	15 rektalkatetre
6901610	Kateterstud til Navina-forbrugsvarer	
6894010	Navina-katetersæt – Normal	10 rektalkatetre
6894310	Navina-katetersæt – Lille	
6901110	Navina-slangesæt	1 kateterslange
		1 vandbeholder-slange
6901200	Tilbehør til Navina	2 griberinge (1 lodret, 1 vandret)
		1 sikkerhedsbånd
		1 fikseringsbånd
		1 Navina Smart-fikserings-klemme
6901411	Navina Smart-kontrolenhed	1 Navina Smart-kontrolenhed
		1 strømadapter
		1 kabel
6901511	Navina Smart-strømadapter og -kabel	1 strømadapter
		1 kabel

Navina™ Smart



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.dk

CE 2797

Rx Only