

LoFric® hydrolfil engangskateter.

For ren intermitterende kateterisering ved kort- eller langtidsanvendelse.

LoFric-katetre skal kun bruges efter henvisning.


Inden anvendelse skal du sikre, at de råd og informationer du har fået omkring kateteriseringen følges.

Læs brugsanvisningen i pakken for vigtig information og komplette instruktioner.

Kontakt den ordinerende læge eller sygeplejerske, hvis du oplever problemer.

Vejledning

1. Vask dine hænder med vand og sæbe før kateterisering.
2. Åbn pakningen 5-6 cm over konnektoren.
3. Fyld pakken med rent vand, derhjemme fra vandhanen og på hospitalet med sterilt vand eller saltvand. Lad katetret være nedsænket i 30 sekunder før brug.
4. Mens du gør dig klar til kateterisering, kan du fjerne klistermærket og bruge den selvklæbende tape til at fastgøre produktet på en tør overflade.
5. Tag katetret ud.
6. Løft penis op mod maven for at rette urinrøret ud. Indsæt katetret langsomt i urinrøret uden at berøre kateterrøret. Når urinen begynder at løbe, føres katetret en smule længere ind for at sikre, at begge kateterøjne er inde i blæren.
7. Vend penis nedad når urinen begynder at løbe gennem katetret.
8. Når urinen stopper med at løbe, trækkes katetret langsomt en lille smule ud. Hvis urinen begynder at løbe igen, skal du vente, indtil den er stoppet, for at sikre fuldstændig blæretømning. Tag derefter katetret ud.
9. Læg katetret tilbage i indpakningen, og kassér det på korrekt vis (de lokale bestemmelser kan variere).

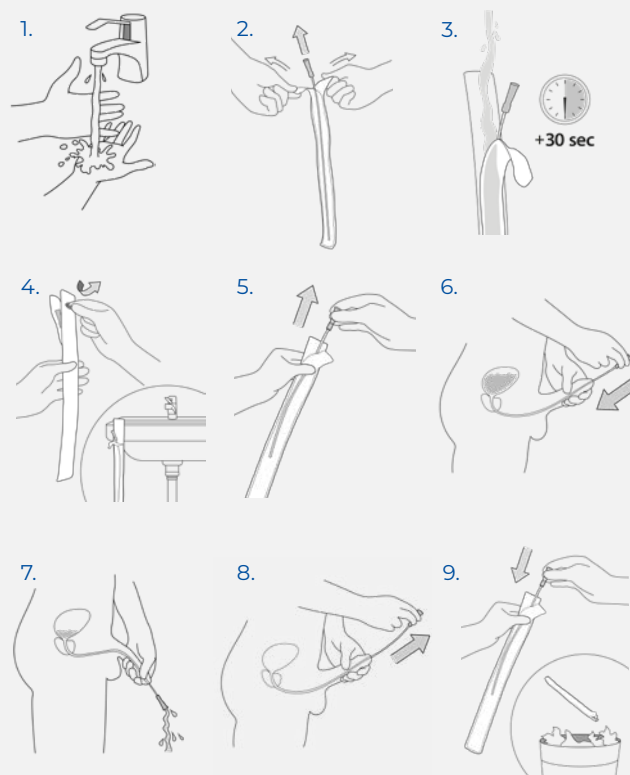


Særlig vejledning til Tiemann/Coudé-kateter med let bøjet spids:

Der kræves en særlig teknik, når du anvender et Tiemann/Coudé-kateter. Tal med sundhedspersonalet om oplæring og rådgivning.

1. Bemærk, hvor markøren på konnektoren er i forhold til den bøjede kateterspids før indføring af katetret. Det vil hjælpe dig med at sikre, at den bøjede spids vender rigtigt under brug.
2. Hold den bøjede spids opad mod maven under indføring og under kateteriseringen, også mens katetret tages ud. Eller følg de specifikke instruktioner, sundhedspersonalet har givet dig.

Tiemann/Coudé

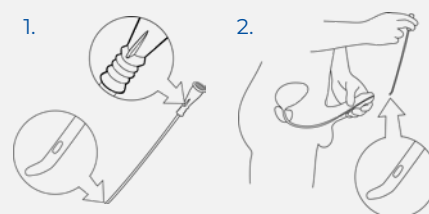

Hos Wellspect udvikler vi innovativ kontinenspleje, der ændrer menneskers liv. Vi er forpligtet til at hjælpe vores brugere til at opbygge selvtillid og uafhængighed, samt et godt helbred og velvære. Vi har været førende i branchen i over 30 år med vores produkt brands LoFric[®] og Navina[™]. Vi skaber pålidelige og brugervenlige produkter til blære- og tarmproblemer med så lille miljøpåvirkning som muligt. Vi stræber passioneret efter at blive klimaneutrale og arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale, der konstant inspirerer os til at forbedre vores produkter og tjenester, på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

Wellspect. En reel forskel.

For mere information om vores produkter og vores initiativer for at fremme kontinenspleje sammen Advancing Continence Care Together (ACCT), kan du besøge [Wellspect.dk](https://www.wellspect.dk).

Deltag i samtaler på Facebook og Instagram.

[wellspect.dk](https://www.wellspect.dk)

