

LoFric Sense - kvindelige brugere

LoFric® Sense™ hydrofilt engangskateter til blæretømning med saltvandsopløsning til aktivering.

Til kort- og langvarig blærebehandling med intermitterende urinkateterisering.

LoFric katetre er kun til brug på bevilling.


Sørg for at følge råd og træning i kateteriseringsproceduren fra sundhedspersonalet inden brug.

Se venligst brugsanvisningen i pakken, for vigtig information og komplette instruktioner.

Kontakt den ordinerende læge, hvis du oplever problemer

BRUGSANVISNING

1. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.
2. Tryk for at aktivere saltopløsningen, og katetret er klart til brug.
3. Træk strimlen op for at åbne.
4. VALGFRI Brug den selvklæbende strimmel på bagsiden for at fastgøre produktet på en tør, ren overflade.
5. Hold lappen på plads, og tag katetret ud.
6. Adskil kønslæberne, og find urinrøret lige over vaginalåbningen. Indsæt katetret langsomt i urinrøret med den anden hånd.
7. Når urinen begynder at løbe, føres katetret en smule længere ind for at sikre, at begge kateterhuller er inde i blæren.
8. Når urinen stopper med at løbe, trækkes katetret langsomt en lille smule ud. Hvis urinen begynder at løbe igen, skal du vente, indtil den er stoppet, for at sikre fuldstændig blæretømning. Tag derefter katetret helt ud.
9. Put katetret tilbage i pakken. Den ydre emballage fungerer som både en hygiejnisk og diskret pose til afskaffelse. Bortskaf det korrekt (lokale regler kan variere)

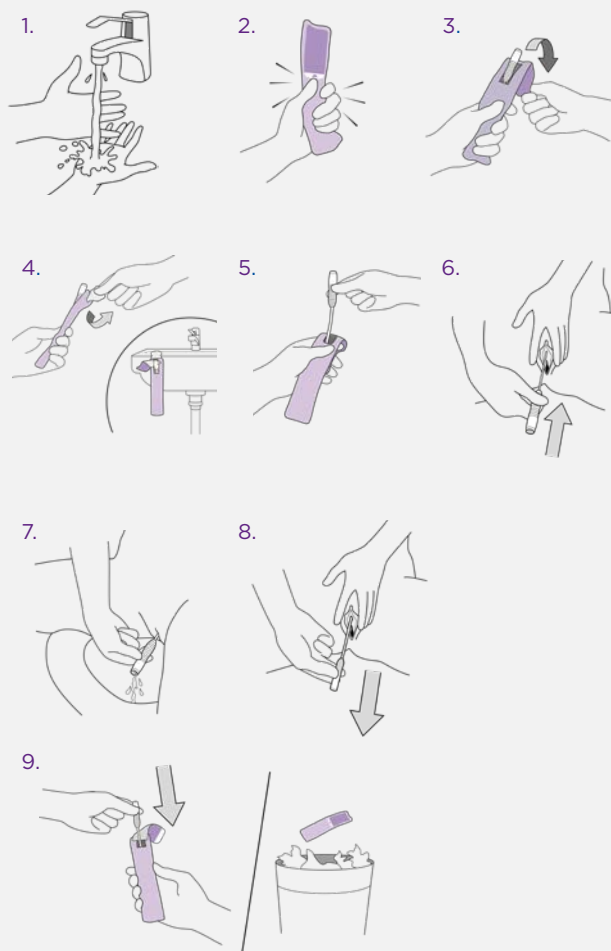

I Hos Wellspect udvikler vi innovativ kontinenspleje, der ændrer menneskers liv. Vi er forpligtet til at hjælpe vores brugere til at opbygge selvtillid og uafhængighed, samt et godt helbred og velvære. Vi har været førende i branchen i over 30 år med vores produkt brands LoFric® og Navina™. Vi skaber pålidelige og brugervenlige produkter til blæreog tarmproblemer med så lille miljøpåvirkning som muligt. Vi stræber passioneret efter at blive klimaneutrale og arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale, der konstant inspirerer os til at forbedre vores produkter og tjenester, på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

Wellspect. En reel forskel.

For mere information om vores produkter og vores initiativer for at fremme kontinenspleje sammen Advancing Continence Care Together (ACCT), kan du besøge [Wellspect.dk](https://www.wellspect.dk).

Deltag i samtaler på Facebook og Instagram.

[wellspect.dk](https://www.wellspect.dk)

